



IL KIT CONTIENE:

- due siringhe di gel sbiancante White Dental Beauty al perossido di carbamide al 16%
- i suoi modelli e le sue mascherine personalizzate
- dentifricio e collutorio Vitis Whitening da usare per tutta la durata del trattamento



SBIANCA MENTO DOMICILIARE



ISTRUZIONI PER L'USO:

- ① SPAZZOLARSI I DENTI COME D'ABITUDINE



- ② INSERIRE IL GEL SBIANCANTE ALL'INTERNO DELLA MASCHERINA APPLICANDO UNA PICCOLA GOCCIA DI PRODOTTO SU CIASCUN DENTE (indicativamente della dimensione di un chicco di riso)



- ③ INSERIRE DELICATAMENTE LA MASCHERINA SUI DENTI ASSICURANDOSI CHE SIA BEN POSIZIONATA (se il gel dovesse fuoriuscire dalle mascherine, rimuovere l'eccesso con un cottonfioc per poi effettuare uno sciacquo con acqua)



- ④ INDOSSARE LE MASCHERINE DALLE 2 ALLE 4 ORE



- ⑤ TOGLIERE LA MASCHERINA E RIMUOVERE IL GEL RESIDUO CON UNO SPAZZOLINO MORBIDO PER POI SCIACQUARE

- ⑥ PULIRE LA MASCHERINA CON UNO SPAZZOLINO MORBIDO E ACQUA CORRENTE FREDDA